

# OMRON

オムロン 携帯型心電計

## HCG-8060T

powered by **AliveCor**




直接販売価格

**¥34,800** (税込)

## 気になった時、すぐに心電図を記録。

携帯しやすい軽量・コンパクトサイズの心電計。

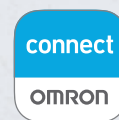

本製品のご使用にはスマートフォンが必要です。

患者さまに日常生活の中で心電図を記録していただくための心電計です。安静時の12誘導心電図検査や、ホルター心電図検査で所見がない患者さま、発作の頻度が低い患者さまが、発作時などご自身で記録することができます。記録された心電図は、確定診断に活用いただけます。


## 2種類のモードで心電図を記録

記録した心電図はスマートフォンアプリ<sup>\*1</sup>で表示。

「OMRON connect」アプリを起動し、各電極に肌が触れると、自動で記録が始まります。過去の記録もアプリから確認できます。


### 1誘導心電図の場合

平らな場所に本体を置き、「OMRON connect」アプリを起動します。本体おもて面の電極に指をのせ、記録が終わるまで、会話をせず、安静にします。

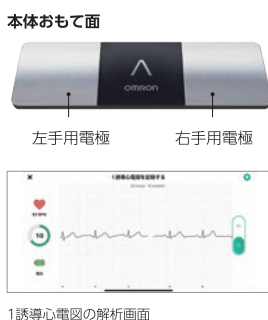

### 6誘導<sup>\*2</sup>心電図の場合

アプリを起動し、本体おもて面の電極に親指をあてて持ち、左足(ひざ上または足首の内側)の肌と本体うら面の電極を下図のように密着させ、安静にします。

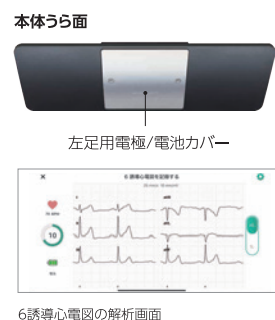

\*1 本製品を使用するには、対応するスマートフォンとスマートフォンアプリ「OMRON connect」(無料)のインストールが必要です。


\*2 本製品は3電極から得られる信号から疑似的に6誘導心電図波形に相当する波形を算出しています。

● Bluetooth® ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する商標であり、オムロンヘルスケア株式会社は、これらの商標を使用する許可を受けています。

## 6つのパターンの解析結果を表示します。

記録が終了すると、「OMRON connect」アプリが解析を開始します。解析後、1誘導または6誘導\*の心電図波形、心拍数、解析結果が画面に表示されます。

\*6誘導の解析結果は、6つの波形のうちの1つの波形を解析した結果です。

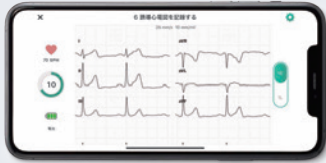


### ■ 分類できません

記録した心電図が「正常な洞調律」「頻脈」「徐脈」「心房細動の可能性」のいずれの分類にも該当しなかったときに表示。

### ■ 解析できません

心電図を正しく読み取れなかったときに表示。

### ■ 正常な洞調律

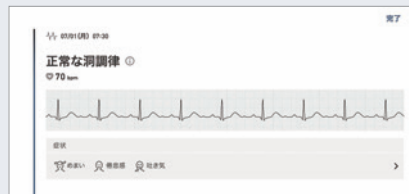

### ■ 徐脈



### ■ 頻脈




### ■ 心房細動の可能性



## 記録した心電図をプリントアウトできます。

### ■ 6誘導心電図イメージ

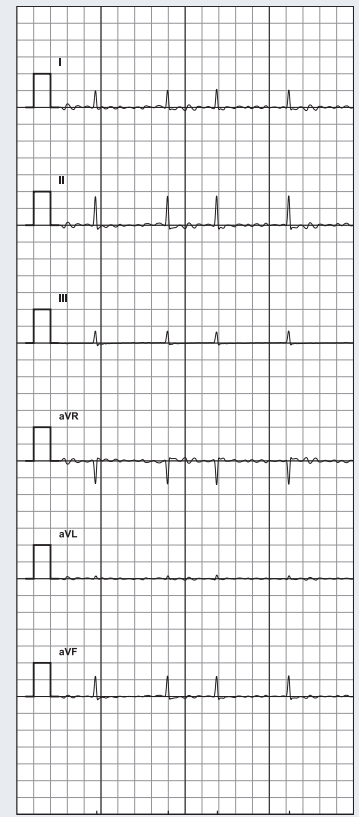

## お読みください

- 本製品は成人の心電図と心拍数の計測を目的としています。対象年齢は18歳以上です。
- 本製品の電源はリチウム電池CR2016(1個)です。
- 本製品を使用するには、対応するスマートフォンとスマートフォンアプリ「OMRON connect」(無料)のインストールが必要です。
- 本製品のお手入れは乾いた柔らかい布で拭き取ってください。本体の汚れがひどい場合は水または薄めた中性洗剤をしみこませた布で、電極の汚れがひどい場合はアルコール消毒液で湿らせた柔らかい布で拭き取ってください。

主な仕様	
販売名	オムロン 携帯型心電計 HCG-8060T
医療機器承認番号	30400BZX00046000
販売商品コード	HCG-8060T
通信方式	Bluetooth® Low Energy
誘導方式	1誘導 双極1チャンネル、6誘導 双極/単極 各3チャンネル
心拍計数範囲	30~300拍/分
メモリ	スマートフォンアプリ内で保存
電撃保護	内部電源機器
電源	DC3V (リチウム電池 CR2016×1個)
電池寿命	約12カ月 (当社試験条件による)
本体質量	約24g (電池含む)
外形寸法	約 縦30×横90×厚さ7.4mm
付属品	お試し用電池 (リチウム電池 CR2016×1個、内蔵)、取扱説明書、購入者記録票

※お断りなく機器やアプリの仕様を変更する場合があります。

発作時心臓活動記録装置

管理医療機器

特定保守管理医療機器

対応スマートフォンの確認はこちらから

<https://www.omronconnect.com/devices/>



※ 1台のスマートフォンで、1ユーザーのデータを管理します。  
※ 心電図記録・解析機能のご使用には本アプリのダウンロードが必要です。  
本製品は、米国AliveCor社によって開発された心電図の記録・解析に関する技術を使用しています。

※ AliveCor社は携帯型心電計の販売と医師による患者の遠隔モニタリングプラットフォームの提供を通じて心房細動の診断および治療支援サービスをおこなう米国の企業です。  
※ 記載されているすべてのブランド名、商品名は各社の商標または登録商標です。



**警告**

- 挿込み型医療機器を装着されている方は、正しく心電図が記録・解析できない恐れがあるため、ご使用にならないでください。
- 航空機内や病院など無線通信が禁止された場所では本製品を使用しないでください。
- 記録した心電図やそれを解析して表示されるメッセージの自己判断・治療は危険です。病状の悪化につながる可能性がありますので、自己判断せず医師に相談してください。



**注意**

- 本製品は日本国内専用です。製品の保証は、日本国内での使用の場合に限りです。Use only in Japan. Product warranty is valid only in Japan.
- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

2.4 XX1

製品のお問い合わせ、別売品や消耗品のご注文は

オムロン ヘルスケア お客様サポート

<https://www.healthcare.omron.co.jp/support/>

オムロン お客様サービスセンター

TEL 0120-18-6606 (通話料無料) FAX 0120-10-1625 (通話料無料) 受付時間9:00~19:00(祝日を除く月~金)

〒151-8503 三重県松阪市久保町1855-370 ※都合により、お休みや受付時間の変更をさせていただく場合があります。



**オムロンヘルスケア株式会社**

〒617-0002 京都府向日市寺戸町九ノ坪 53 番地

ホームページ <https://www.healthcare.omron.co.jp/>